



IST IHR AED

COVID-19 SAFE?

HERZ-LUNGEN-WIEDERBELEBUNG IN ZEITEN VON CORONA.

Der Deutsche Rat für Wiederbelebung hat die Maßnahmen zur Reanimation an die derzeitige Pandemie angepasst. Stellen Sie Ihren AED jetzt auf eine Reanimation ohne Beatmung („compression-only CPR“) um. Wir helfen Ihnen dabei!



REANIMATION IN ZEITEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen Wochen zu erheblichen Veränderungen in allen Lebensbereichen geführt. Besonders das Gesundheitswesen ist davon betroffen und auch vor dem Thema Reanimation und Frühdefibrillation hat die derzeitige Krise keinen Halt gemacht.


Einerseits erfordert der akute Herz-Kreislaufstillstand eine unmittelbar zu beginnende Therapie-maßnahme, gleichzeitig muss jedoch ein maximaler Schutz der hilfeleistenden Laien oder des medizinischen Fachpersonals in der gegebenen Situation sichergestellt werden. Da es auch zukünftig immer wieder zu solchen Ausnahmezuständen kommen kann, ist eine Ansteckung bei der Beatmung eines Patienten, nicht nur heute ein aktuelles Thema.

Der Deutsche Rat für Wiederbelebung (GRC) hat daher die Maßnahmen zur Reanimation angepasst. In der aktuellen Stellungnahme¹ zur Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen im Umfeld der COVID-19-Pandemie heißt es:

„Die Wiederbelebungsmaßnahmen durch Laien und Ersthelfer sollen sich bei unbekannten Hilfsbedürftigen auf die Herzdruckmassage und den Einsatz von öffentlich zugänglichen Automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) beschränken. Auf die Atemspende soll in diesen Fällen verzichtet werden.“

„Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Durchführung der Atemspende eine besondere Rolle [...]. Die Entscheidung zur Durchführung einer Atemspende sollte im Bewusstsein des potentiellen Infektionsrisikos [...] getroffen werden.“

Die Stellungnahme des GRC sowie die neuen, angepassten Maßnahmen zur Reanimation können Sie hier downloaden: <https://defiworld.de/service-download>




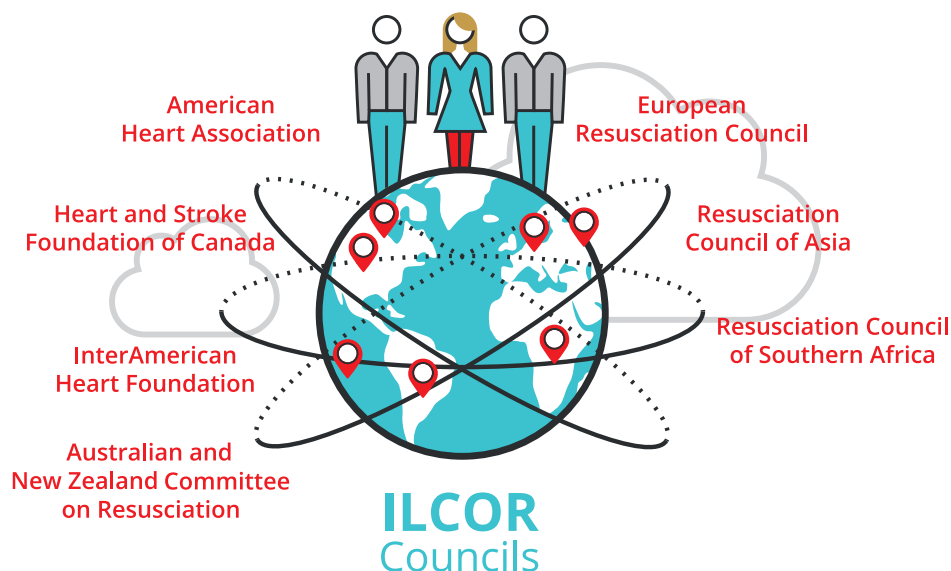


Die Wiederbelebung ohne Beatmung ist immer wieder ein wichtiges Thema und es wird weiterhin geforscht, welche Reanimationstechniken am effektivsten sind. Möchten Sie mehr zu diesem Thema erfahren? Dann besuchen Sie die Seiten des Deutschen Rats für Wiederbelebung – German Resuscitation Council (GRC), des European Research Council (ERC) oder des International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Dort finden Sie umfangreiches Informationsmaterial, Forschungsergebnisse und vieles mehr.

➤ www.grc-org.de ➤ www.erc.europa.eu ➤ www.ilcor.org

¹Quelle: <https://www.grc-org.de/ueber-uns/aktuelles/130-Stellungnahme-des-GRC-zur-Durchfuhrung-von-Wiederbelebungsmassnahmen-im-Umfeld-der-COVID-19-Pandemie>

MACHEN SIE IHREN AED COVID-19 SAFE

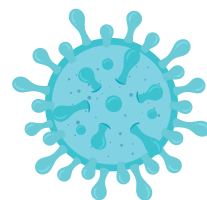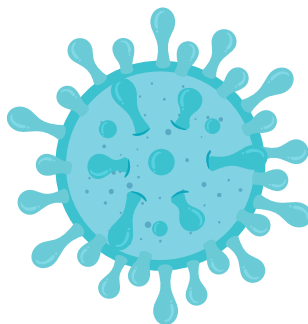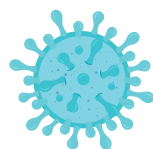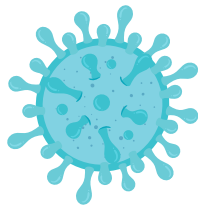

Wir empfehlen Ihnen, Ihre vorhandenen AED-Geräte auf Reanimation ohne Beatmung („compression-only CPR“) umzustellen. Oder, falls eine solche Umstellung nicht möglich ist, Ihre Defibrillatoren gegen andere Modelle, die „COVID-19 safe“ sind, auszutauschen.

Hier finden Sie eine Übersicht gängiger AED-Modelle, die die Möglichkeit bieten, auf eine Reanimation ohne Beatmungsanweisungen² umgestellt zu werden, also **COVID-19 safe** ✓ sind:



LIFEPAK CR2



HeartSine samaritan
PAD 350P/360P/500P



HeartSine samaritan
PAD connected
350P/360P/500P



LP 1000




Powerheart G3
Elite



Powerheart G5



Powerheart G5 ICPR

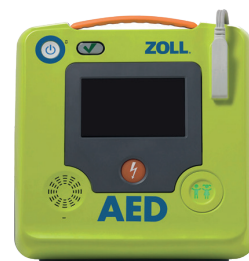

Zoll AED 3



²Quellen:

- Handbuch LIFEPAK CR2
- Handbuch HeartSine samaritan PAD 350P/360P/500P
- Handbuch HeartSine samaritan PAD connected 350P/360P/500P

- Handbuch LP 1000
- Handbuch Powerheart G3 Elite
- Handbuch Powerheart G5/ Powerheart G5 ICPR
- Handbuch Zoll AED 3



COVID-19
safe

UNSICHER? WIR BERATEN SIE GERNE!

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr AED-Gerät COVID-19 safe ist, helfen wir Ihnen gerne weiter. Auch bei einer Umstellung Ihres AED auf Reanimation ohne Beatmung („compression-only CPR“) stehen wir Ihnen gerne kompetent zur Seite. Benötigen Sie Hilfe bei der Anschaffung eines neuen AED? Wir beraten Sie persönlich und umfassend.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Kennen Sie schon unsere HEARTSAFE Initiative?
Wir setzen uns für eine herzsichere Umgebung, in jedem Bereich des Lebens ein:
www.heart-safe.de



Medical Industrie GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Straße 16
40822 Mettmann
Deutschland

T +49 2104 1775-0
F +49 2104 1775-177
info@medical-industrie.de
www.medical-industrie.de

Heartsafe und defiworld sind eingetragene Marken der Medical Industrie GmbH & Co. KG
www.heart-safe.de · www.defiworld.de

