

24. Februar 2023


ZOLL AED Plus® Duracell Batterie

ZOLL empfiehlt weiterhin Duracell Coppertop CR123-Batterien (DL123ABKM) für die Verwendung mit dem AED Plus®. Es ist allerdings wichtig zu wissen, dass Duracell Coppertop-Batterien jetzt in den USA und China herstellt. Die Batterien sehen zwar ähnlich aus, unterscheiden sich aber in ihrer Leistung. Um eine optimale Langlebigkeit des AED Plus zu gewährleisten, sollten Kunden nur in den USA hergestellte Batterien verwenden. In den USA hergestellte Batterien tragen die Aufschrift "Made in USA" auf dem Etikett der Batterie. In China hergestellte Batterien sind mit "Made in China" gekennzeichnet.

Häufig gestellte Fragen

- Warum können im AED Plus nicht alle CR123-Batterien verwendet werden?
 - Es ist möglich, dass in China hergestellte Batterien eine andere chemische Zusammensetzung haben als in den USA hergestellte Batterien. Die in den USA hergestellten Duracell CR123-Batterien wurden von ZOLL geprüft und gehören zu den zugelassenen Batterien, die in unserem Gerätehandbuch aufgeführt sind.
- Wie kann ich feststellen, ob meine Batterie die richtige ist?
 - Bitte sehen Sie nebenstehend das Bild mit der Markierung "Made in USA".

ZOLL vertreibt ausschließlich Duracell-Batterien "Made in USA". Kunden wird empfohlen, Duracell-Ersatzbatterien bei den Großhandelspartnern zu kaufen, bei denen Sie Ihren AED gekauft haben, oder direkt bei ZOLL. Alternativ können Sie auch überprüfen, ob das Produkt in den USA hergestellt wurde, wenn sie das Produkt vor Ort beziehen.

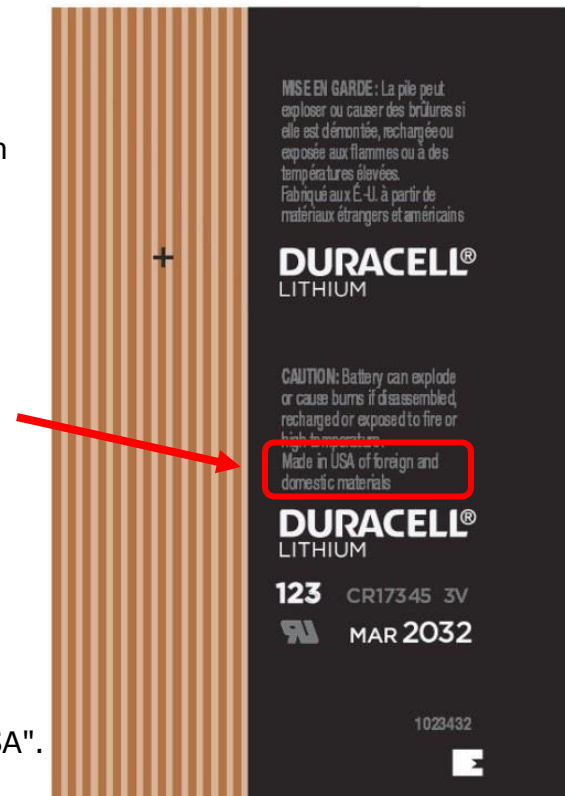

Kunden	Telefonnummern und Kontaktinformationen finden Sie unter https://www.zoll.com/de/kontakt/zoll-weltweit
--------	--